

Manual de instruções: Aparelho de pressão 1 via LHV MED

- Nome do produto: **Esfigmomanômetro Veterinário 1 via**
- Modelo: LHV-E100
- Indicações: Utilizado na medição de pressão arterial em animais de diversas espécies e tamanhos.

- Estrutura:



Importante

- Equipamento exclusivo para uso veterinário.
- A medição de pressão em determinadas espécies pode não ser possível.
- O Excesso de pelos pode interferir na medição.

- Instruções de uso

1. Conecte o manguito/Braçadeira.
2. Verifique se o tamanho do manguito está de acordo com o tamanho do paciente.
3. Coloque o manguito no paciente.
4. Pressione o bulbo até o marcador chegar na pressão desejada.
 - Manutenção, limpeza, desinfecção e esterilização:

1. Higienize com pano úmido.

- Garantia

1. Esse equipamento possui 12 meses de garantia contra defeito de fabricação. A garantia não se estende para casos de mau uso e utilização fora dos padrões/orientações exigidos pelo manual. O produto com defeito deve ser enviado para a empresa Matriz Osasco para avaliação e tratativa. Frete de envio e retorno será por conta do cliente.

- Data de fabricação: Veja Embalagem do produto
- Vida útil : N/A

Especificação Técnica

Tipo Aneróide

Método de medição: Auscultação

Precisão: ± 3 mmHg

Taxa de liberação de ar: 2 mmHg/segundo

Temperatura de armazenamento : De -20 a 70 °C

Umidade: Até 85% de umidade relativa do ar

Dimensões 180 x 64 x 47 mm

Normas contempladas EN1060-1:1996, EN1060-2:1996 e

ANSI/AAMI SP10

Peso 153 g

Importado e Distribuído por:

Lhvmed Importação E Comercio De Equipamentos Medicos Ltda

CNPJ: 37.672.907/0001-07

Endereço: Pc Florinda Sinegalha Saraiva, 353- Km 18 - Osasco - Sp

Cep: 06.190-110 – Brasil

Tel: 11 91284-3535 e 11 3014-4780

Fabricado: China