

CURATIVO TRANSPARENTE VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Curativo Veterinário Transparente em Rolo Não Estéril
Matéria Prima: Filme transparente de poliuretano (PU) com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegido por papel siliconizado.
Produto Estéril: () Sim (x) Não
Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

O Curativo transparente não estéril em rolo para uso veterinário da Royal Tech Import é confeccionado em poliuretano permeável a gases e impermeável à água, que deve ser aderido à pele do animal para promover a proteção da pele ou ferimentos contra fatores externos como agentes contaminantes e agressões mecânicas.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado sempre que houver necessidade de um curativo que forneça cobertura protetora da pele. Usado como cobertura primária ou secundária na proteção de suturas e na fixação e retenção de curativos, cateteres, compressas, drenos, tubos de drenagem e também no auxílio da redução de úlceras de pressão.

INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Necessário realizar a tricotomia na região onde for aplicado o curativo;
- Após a tricotomia realizar a assepsia do ferimento;
- A aplicação suave da Tintura de Benjoin solução a 20% antes da aplicação do curativo fornece uma melhor aderência, evitando o descolamento com facilidade (Não indicado para pacientes alérgicos a essa substância);
- Recorte o curativo no tamanho adequado, estabelecendo a margem de no mínimo 2cm para cada lado da borda do ferimento (Fig. 01);
- Retire a película protetora de cor branca por completo (Fig. 02);
- Aplicar o curativo sobre o local desejado e pressione de forma suave do centro para a extremidade de todo o curativo para que a parte adesiva fixe de forma uniforme (Fig. 03);
- Não estique o curativo durante sua aplicação;
- Remova o papel de cobertura quadriculado puxando um dos lados do centro para a extremidade e depois remova o outro lado (Fig. 04);
- Alise o filme com a ponta dos dedos para garantir uma boa adesão (Fig. 05);
- Tempo de permanência não deve ultrapassar 7 dias;
- Para retirar o curativo é indicado utilizar um removedor de curativos para peles sensíveis;
- Destinar ao lixo hospitalar após o uso.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Comprimento: 10 metros (1000cm);
- Largura: 10cm (100mm);
- Espessura: 0.025mm.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CTVRTI	CURATIVO TRANSPARENTE VETERINÁRIO (10CMx10M) 1ROLO (RTI)

FOTO**COMPOSIÇÃO**

- Filme: Poliuretano 100%;
- Adesivo: Poliacrilato hipoalergênico;
- Filme de suporte: Poliéster revestido com polietileno e silicone;
- Papel de cobertura: Papel siliconado.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não usar em feridas infectadas ou abertas;
- Não estique o filme durante a aplicação;
- Não utilizar em casos de sensibilidade a algum componente do curativo;
- Em caso de reação alérgica ou qualquer outro efeito adverso o uso do curativo deve ser suspenso imediatamente;
- Não deve ser reutilizado ou reesterilizado;
- A reutilização irá causar contaminação cruzada;
- Não ultrapassar a permanência do curativo de 7 dias;
- Descartar em lixo hospitalar após o uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Caixa de papel cartão.

DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81670-080 - CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado no Egito.