

**EQUIPO MACROGOTAS VETERINÁRIO (RTI)****REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

**PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO****DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: EQUIPO PARENTERAL DE USO VETERINÁRIO MACROGOTAS, COM INJETOR LATERAL, LUER SLIP COM TAMPA E CLAMP CORTA FLUXO

Matéria Prima: PVC (cloreto de polivinila)

Produto Estéril: (X) Sim ( ) Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 3 anos

**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO****DESCRIÇÃO**

O Equipamento para infusão parenteral de uso veterinário da Royal Tech Import é composto de luer slip tampado, injetor lateral com aba de proteção (Nr32), conjunto pinça rolete, clamp corta fluxo, câmara de gotejamento sem ar e sem filtro. É confeccionado em PVC cristal de alta qualidade, possui extensão de 250cm para facilitar o manejo hospitalar veterinário, proporcionando conforto e segurança para o paciente. Produto estéril, apirogênico, atóxico e isento de látex.

**INDICAÇÃO DE USO**

Indicado para infusão de soluções parenterais, utilizando o método gravitacional ou associado a uma bomba de infusão para equipamento universal peristáltica. Usado em conjunto com cateter intravenoso periférico, cateter venoso central ou demais dispositivos médicos.

**INSTRUÇÕES DE USO**

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Antes de abrir a embalagem verifique a validade e a integridade do produto;
- Abrir a embalagem de forma asséptica;
- Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;
- Introduzir a ponta perfurante do equipo no frasco/ampola (sistema fechado);
- Suspender o frasco em um suporte adequado;
- Retirar a tampa protetora da extremidade do equipo;
- Abrir o controlador de fluxo para permitir que a solução desloque inteiramente o ar ao longo do tubo;
- Fechar o controlador de fluxo;
- Conectar a extremidade distal no cateter do paciente;
- Regular o fluxo conforme a prescrição médica;
- Destinar ao lixo hospitalar após o uso.


**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Extensão do equipo: 2.5 metros (250cm);
- Diâmetro do tubo: 3.0 x 4.0 mm (9 French);
- Primer aprox.: 17.7ml;
- Macrogotas: Destinado a liberar aproximadamente 20 gotas/ml.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   |
|---------------|--|
| EVRTI         | EQUIPO MACROGOTAS VETERINÁRIO 2.5M (9FR) COMPLETO COM CLAMP LS (RTI) |

FOTO:

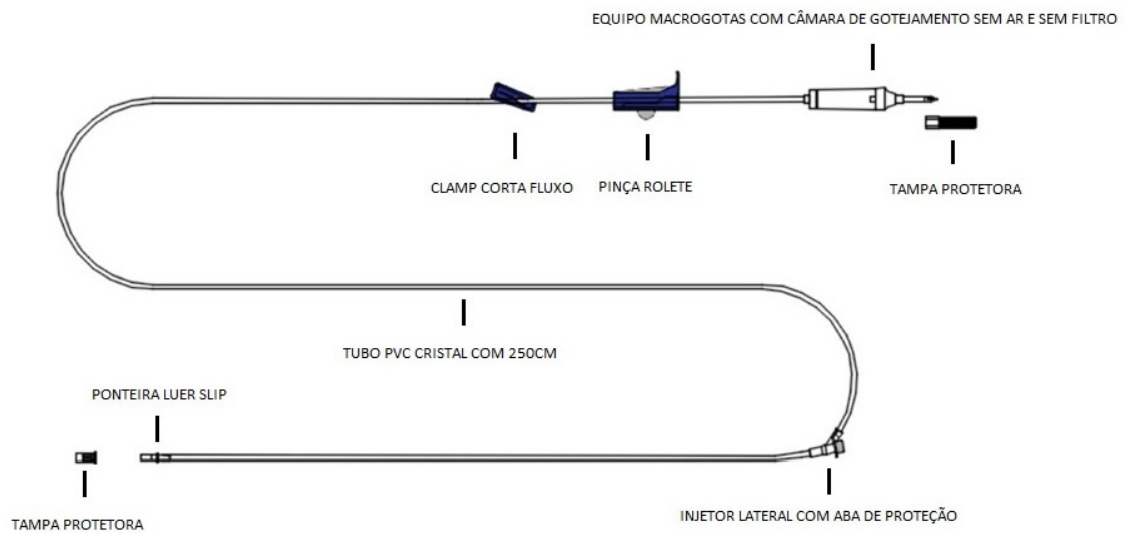

### COMPOSIÇÃO

- Tubo: PVC cristal (cloreto de polivinila);
- Produto isento de látex.

### PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não deve ser reutilizado ou reesterilizado;
- A reutilização irá causar contaminação cruzada;
- Descartar em lixo hospitalar após o uso.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

### FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente.

### DISTRIBUÍDO POR:

#### **ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81670-080 - CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

### FABRICANTE:

Produto fabricado no Brasil.