

**BOLSA COLETORA DE URINA COM EXTENSOR PARA USO VETERINÁRIO(RTI)****REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

**PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO****DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: Bolsa Coletora de Urina Estéril com Sistema Fechado para Uso Veterinário

Matéria Prima: PVC (cloreto de polivinila) e Policarbonato

Produto Estéril: (X) Sim ( ) Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: Indeterminada

**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO****DESCRIÇÃO**

A Bolsa estéril coletora de urina com sistema fechado veterinária da Royal Tech Import é confeccionada em PVC e Policarbonato de alta qualidade, possui capacidade para armazenar 400ml de urina. Desenvolvida para conectar em sondas uretrais que possuem sistema luer lock, seu extensor é espiral e flexível, com comprimento de 1.8 metros para maior mobilidade e conforto do paciente. Para facilitar o monitoramento do fluxo urinário, a bolsa possui marcações de 50, 250 e 400ml. Para maior segurança possui duas válvulas, uma anti-refluxo e outra de esvaziamento.

**INDICAÇÃO DE USO**

Indicado como reservatório coletor de urina para os pacientes veterinários que possuem cateterismo vesical com sondas veterinárias especiais que possuem conector luer lock. Possui capacidade para coletar 400ml de urina, destina-se para pequenos animais como cães e gatos de pequeno a médio porte que necessitam de um monitoramento do fluxo urinário constante, pacientes hospitalizados que possuem retenção, incapacidade ou incontinência urinária ou outras anormalidades que impossibilitam o animal a realizar o esvaziamento vesical de forma natural.

**INSTRUÇÕES DE USO**

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Realizar o cateterismo vesical do paciente veterinário com a técnica e sonda adequada para o sexo e espécie;
- Retirar as tampas protetoras do extensor espiral e conectar uma extremidade no conector luer da bolsa e a outra no conector luer da sonda uretral;
- Utilizar colar protetor para evitar a mordedura do paciente no sistema de drenagem urinária;
- Recortar com uma tesoura e com cuidado as marcações laterais para utilizar na fixação da bolsa;
- Fixar a bolsa em local seguro;
- Utilizar a válvula de esvaziamento sempre que a urina preencher a capacidade máxima da bolsa;
- Destinar ao lixo hospitalar após o uso.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Bolsa: Capacidade 400ml;
- Extensor espiral: Comprimento: 1.8 metros (180cm);
- Tamanho: altura 22.3 cm e largura 14 cm.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| BCURTI | BOLSA COLETORA DE URINA 400ML (VETERINÁRIA) PCT10UN (RTI) |

FOTO:



**COMPOSIÇÃO**

- Bolsa: PVC (cloreto de polivinila);
- Extensor espiral: PVC (cloreto de polivinila);
- Tampas protetoras do extensor: Policarbonato;
- Conectores luer lock e válvula de esvaziamento: Policarbonato.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não deve ser reutilizado ou reesterilizado;
- A reutilização irá causar contaminação cruzada;
- Descartar em lixo hospitalar após o uso.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM**

- Embalagem primária: Saco plástico (Polietileno);
- Embalagem secundária: Pacote com 10un - Saco plástico (Polietileno).

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:****ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81670-080 - CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

**FABRICANTE:**

Produto fabricado na China.