



EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS VITAL

REGISTRO ANVISA 10296909036

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem de forma asséptica.
2. Realizar assepsia no local de inserção do equipo na bolsa.
3. Fechar a pinça rolete.
4. Introduzir a ponta perfurante na saída apropriada da bolsa de sangue
5. Colocar a bolsa de sangue em posição vertical, para transfusão;
6. Encher a câmara superior do equipo e sob pressão / descompressão digital passar sangue para a câmara inferior, até altura de 1/3
7. Abrir a pinça rolete e retirar o ar de toda a extensão.
8. Conectar a ponta Luer escolhida no dispositivo de acesso venoso.
9. Controlar o fluxo de gotejamento de acordo com a prescrição médica.
10. Caso necessário abrir a entrada de ar.
11. Após a utilização descartar em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Lave bem as mãos e utilize luva descartável.

Informamos que 20 gotas de água destilada liberadas pelo gotejador são equivalentes a um volume de $(1 \pm 0,1)$ mL $[(1 \pm 0,1)]$ g;

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Abrir a embalagem de forma asséptica.

O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Artigo médico-hospitalar de uso único.

Destruir após o seu uso. Atóxico. Livre de pirogênicos. Proibido reprocessar.

Respeitar sempre o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.



Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, limpo e seco, em paletes ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor (temperatura ideal 10º a 40ºC) e da luz, mantendo em local fresco e seco (umidade ideal 20-80%).

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

