

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TNT SMS 40G (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Avental Cirúrgico Estéril Azul SMS PP40

Matéria Prima: Avental: 100 % Polipropileno

Toalha: 100 % Viscose

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 2 Anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

Avental veterinário de aplicação em cirurgias com itens fabricados 100% polipropileno SMS em PP40 pronto para o uso. Produto sempre embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por ETO.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado o uso em procedimentos cirúrgicos ou que necessitem da proteção do profissional, com o intuito de evitar contaminações.

INSTRUÇÕES DE USO

- Abrir a embalagem em papel grau cirúrgico;
- Abrir a embalagem em wrap confeccionado em não tecido SMS;
- Coloque a mão direita na dobra em direção a manga do avental e levante-o;
- Com a mão esquerda dentro do avental, comece a abri-lo;
- Ajuste o avental nas mangas e ombros;
- Ajuste as mangas e ombros do avental;
- Amarrar as tiras internas do avental;
- Segure o TAG com a mão direita e remover uma tira com a esquerda;
- Entregue o TAG ao assistente, que o devolverá após o transpasse pelas costas. Puxe a tira longa do cartão que o assistente segura e amarre as tiras, garantindo o fechamento.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
046.00.0068	AVENTAL CIR. EST. SMS AZUL 40G + TOALHA (01) VETERINÁRIO (G) PCT1UN (RTI)
046.00.0067	AVENTAL CIR. EST. SMS AZUL 40G + TOALHA (01) VETERINÁRIO (EGG) PCT1UN (RTI)

FOTO

1UN AVENTAL CIR. EST. SMS AZUL 40G



1UN TOALHA 100% VISCOSE

ISENTO DE LÁTEX*COMPOSIÇÃO**

- AVENTAL: 100% Polipropileno;
- TOALHA: 100% Viscose;
- Atóxico;
- Não Inflamável;
- Uso único.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem de papel grau cirúrgico contendo 1 unidade.

DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: www.royaltechimport.com.br

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado no Brasil.