



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

Nome do produto: RIOVEX 250ML

Apresentação: 250 mL SILK

AR012024 - E0722

Tamanho real: 180mmx70mm

Data de atualização: 04/06/2024

Cores: ■ PANTONE 7473 C
■ PATONE 5535 C

180mm

70mm

Riovex

REMOVEDOR
NÃO CORROSIVO*

IDEAL PARA
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS
REMOÇÃO DE COLA E ADESIVOS

250mL



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979



ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

FINALIDADE: O Riovex® é um removedor de cola proveniente de adesivos e etiquetas, utilizados em superfícies e artigos médicos nos processos hospitalares. Não deixa resíduos, facilitando o reprocesso dos artigos. **MODO DE USAR:** Aplicar o Riovex® sobre a etiqueta ou resíduos de cola dos instrumentais previamente limpos e deixar agir de 3 à 5 minutos. Retire com auxílio de um tecido. Repetir o processo, se necessário, e seguir com o protocolo de lavagem e desinfecção/esterilização. Para etiquetas plastificadas, remova manualmente a camada superficial antes de aplicar o produto. **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** *Não corrosivo para aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Não ingerir. Evitar a região dos olhos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou SERVIÇO DE SAÚDE mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **CUIDADO! INFLAMÁVEL. MANTER LONGE DAS CHAMAS OU DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS.** **CONSERVAÇÃO:** Conservar em temperatura ambiente (15-30°C), protegido do sol e do calor.

COMPOSIÇÃO: Etilglicol, solvente e veículo.

Telefone Centro de Intoxicações - 0800 0148110

Responsável Técnico: José Antonio de Oliveira
CRQ 04407179 - IV Região-SP

Fabricado por: RIOQUÍMICA S.A.

Avenida Tarraf, 2590/2600 - Jardim Anice
São José do Rio Preto - SP - CEP: 15057-441
Fone: (17) 4009 4288 - SAC: 0800 011 4288
CNPJ: 55.643.555/0001-43

Indústria Brasileira
www.rioquimica.com.br

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA

Nº 25351.325225/2024-01

AFE. Nº 3.01.329-1.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

Lote e fabricação impressos na embalagem.



AR012024-E0722