

CONECTOR T VETERINÁRIO PARA INFUSÃO PARENTERAL (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Conector para infusão parenteral luer lock de uso veterinário com injetor, extensor e corta fluxo

Matéria Prima: PVC (cloreto de polivinila), Policarbonato e borracha sintética

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

O conector T para infusão parenteral de uso veterinário da Royal Tech Import, é composto por uma conexão luer lock, injetor com membrana autocicatrizante, extensor com prime reduzido de 20cm e um dispositivo corta fluxo. Esse conector proporciona um acesso parenteral versátil e seguro, podendo fornecer dois acessos simultâneos para fornecimento de medicamentos, fluidoterapia ou transfusão de sangue ao paciente. A membrana autocicatrizante permite injeções periódicas, enquanto outras infusões são realizadas pelo acesso do extensor. Produto estéril, apirogênico, atóxico e Isento de látex.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para auxiliar as infusões de soluções parenterais, sendo usado em conjunto com cateter intravenoso periférico ou demais dispositivos médicos.

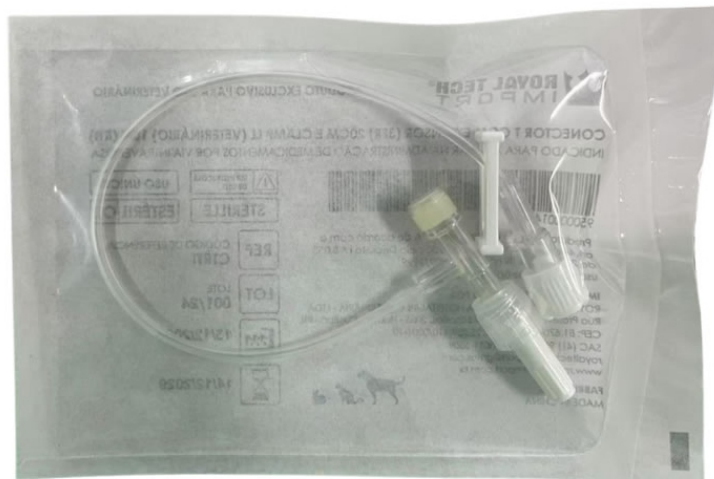
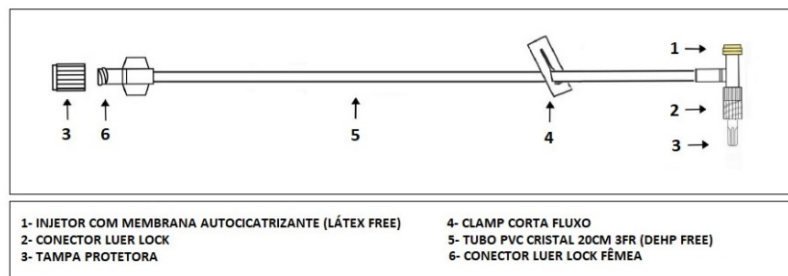
INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Antes de abrir a embalagem, verifique a validade e a integridade do produto;
- Abrir a embalagem de forma asséptica;
- Retirar a tampa protetora do extensor do dispositivo;
- Realizar flush com solução salina com auxílio de uma seringa ou equipo para infusão parenteral;
- Se for utilizar um equipo, suspender o frasco em um suporte adequado;

- Abrir o controlador de fluxo e permitir que a solução desloque inteiramente o ar ao longo do tubo;
- Fechar o controlador de fluxo;
- Conectar a extremidade distal luer lock no cateter do paciente;
- Fixar o conector corretamente para evitar acidentes;
- Regular o fluxo das infusões e periodicidade conforme a prescrição médica;
- Higienizar o injetor com membrana autocicatrizante após as infusões;
- Destinar ao lixo hospitalar após o uso.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CTRTI	CONECTOR T COM EXTENSOR (3FR) 20CM E CLAMP LL (VETERINÁRIO) 1UN (RTI)
CTRTI100UN	CONECTOR T COM EXTENSOR (3FR) 20CM E CLAMP LL (VETERINÁRIO) CX100UN (RTI)

FOTO**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Extensão do tubo: 20cm;
- Diâmetro do tubo: 1.0 x 2.0 mm (3 French);
- Diâmetro do conector (membrana autocicatrizante): Ø: 10.3 ±0.3mm;
- Primer aprox.: 0.4ml;
- Pressão máxima de Trabalho: ≤ 2MPa.

COMPOSIÇÃO

- Conectores: Policarbonato;
- Tampas: Policarbonato;
- Tubo: PVC cristal (cloreto de polivinila) livre de DEHP;
- Membrana autocicatrizante: Borracha sintética;
- Produto Isento de látex.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não deve ser reutilizado ou reesterilizado;
- A reutilização irá causar contaminação cruzada;
- Descartar em lixo hospitalar após o uso.

ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Papel grau cirúrgico.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: www.royaltechimport.com.br

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na China.