

INSTRUÇÃO DE USO - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL

Nº REGISTRO	80288099037
NOME TÉCNICO	Seringas Descartáveis
MARACA COMERCIAL	TKL

INDICAÇÃO DE USO As Seringas Hipodérmicas Descartáveis são dispositivos de uso médico-hospitalar, para uso manual. Podem ser utilizadas em combinação com agulhas para aplicação e injeção de soluções, irrigação, aspiração ou extração de fluídos do paciente, conforme técnicas de administração orientadas pelo profissional de saúde responsável. Também podem ser conectadas a escalpes, equipos e outros dispositivos médicos.

MECANISMO DE AÇÃO As Seringas Hipodérmicas Descartáveis, em combinação com outros dispositivos médicos, permitem a administração de soluções no paciente de acordo com a capacidade total graduada.

INSTRUÇÃO DE USO

- 1 - Antes do uso, verifique a integridade da embalagem;
- 2 - Abra a embalagem com técnica asséptica;
- 3 - Retire o produto da embalagem primária;
- 4 - Conecte ao bico da seringa o dispositivo médico indicado;
- 5 - Empurre o êmbolo da seringa no sentido do bico, a fim de lubrificar a borracha de ajuste ou mobilizar o êmbolo;
- 6 - Inicie o procedimento de preparação, punção ou infusão de solução no paciente. Siga as instruções de administração orientadas pelo médico;
- 7 - Após o uso, descarte imediatamente o produto de acordo com as normas de biossegurança. Uso único. Não reutilizar.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. Esterilizado por Óxido de Etileno. Validade de cinco anos. Manter o produto em ambiente limpo, seco e fresco; temperatura ambiente e com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO **TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**
Matriz: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 | CIC | CEP: 81290-270 | Curitiba | PR | Brasil | Fone: +55 41 3022.0926
Filial: Av. Nilo Bittencourt, 55 | Unidade 05 | São Vicente | CEP: 88312-400 | Itajaí | SC | Brasil
www.tklbrasil.com.br | comercial@tklbrasil.com.br | [@atlbrasil](https://www.instagram.com/atlbrasil)