

**NOME DO PRODUTO: AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO WILTEX
- WUZHOU**

Número ANVISA: 10150470664

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulha

Matéria Prima: Aço Inox

Método de Esterilização: Óxido de etileno

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A Agulha Hipodérmica Estéril de uso único – WILTEX. Apresentação em diversos calibres e tamanhos, com o canhão colorido conforme o padrão internacional de cores.

INDICAÇÃO DE USO

Este dispositivo destina-se à injeção ou aspiração de fluidos utilizando uma seringa Luer-Lock ou Luer-Slip.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem unitária de forma asséptica. Para evitar a contaminação, tenha cuidado para não tocar no conector Luer da Agulha Hipodérmica.
2. Com um movimento de rotação suave, adapte a seringa ao conector Luer da Agulha Hipodérmica Wiltex.
3. Remova a tampa da agulha.
4. Aspire o fármaco para a seringa utilizando a técnica asséptica.
5. Execute a injeção seguindo os protocolos médicos vigentes e uma técnica asséptica.
6. Após a conclusão do procedimento, elimine em um recipiente adequado para perfuro cortantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componente	Material
Canhão	Polipropileno
Tampa da agulha	Polipropileno
Tubo da agulha	Aço inox SUS304
Lubrificante	Polidimethyl siloxane.



**Isento de látex e DEHP*

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALIBRE	MEDIDA ANTERIOR	MEDIDA ATUAL	COR
ZSZ1640	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	16GX1 ½	40x16	1,60X40mm	branco
ZSZ1840	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	18GX1 ½	40x12	1,20x40mm	rosa
ZSZ1925	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	19G x 1	25x5	1,00x25mm	creme
ZSZ1930	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	19GX1¼	30x10	1,00x30mm	creme
ZSZ2125	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	21GX1	25x8	0,80x25mm	verde
ZSZ2130	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	21GX1¼	30x8	0,80x30mm	verde
ZSZ2140	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	21GX1½	40x8	0,80x40mm	verde
ZSZ2225	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	22GX1	25x7	0,70x25mm	preto
ZSZ2230	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	22GX1¼	30x7	0,70x30mm	preto
ZSZ2325	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	23GX1	25x6	0,60x25mm	azul
ZSZ2420	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	24GX3/4	20x5,5	0,55x20mm	roxo
ZSZ2613	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	26GX1/2	13x4,5	0,45x13mm	marron
ZSZ3013	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	30GX1/2	13x3	0,30x13mm	amarelo

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Agulha hipodérmica estéril de uso único Wiltex é fornecida em embalagem individualmente blister papel grau cirúrgico e plástico de polipropileno (PP) / polietileno (PE); caixa secundária em papel triplex e caixa de transporte de papelão ondulado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado na umidade relativa não superior a 80%, nenhum gás corrosivo, um local fresco, seco e bem sala ventilada.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Este produto deve ser mantido limpo durante o transporte, evitar a luz direta do sol, manter longe de artigos de desinfecção corrosivos, como o cloro

ADVERTÊNCIAS

Deve ser utilizado por profissional habilitado

Não utilizar se a embalagem estiver violada

Produto de uso único, proibido reprocessar.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br