

**INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO AGULHA PARA ASPIRAÇÃO ESTÉRIL  
DE USO ÚNICO**

Trata-se de um dispositivo fabricado a partir de resinas de plástico e cânula de aço, visando facilitar o uso, a esterilização e o descarte.

Para garantir a esterilidade do medicamento e dos materiais utilizados, são necessários cuidados que vão desde a lavagem das mãos até o preparo final da agulha a ser acoplada na seringa.

- 1) Pela extremidade próxima à marca do lote, abra a embalagem separando as duas faces até expor o êmbolo da seringa.
- 2) Desembale a agulha e firmemente acople a mesma ao bico da seringa tocando apenas no protetor convencional e somente desencape no momento do uso.
- 3) Confira a fixação da agulha com a seringa quando estiverem acopladas, tocando apenas na ponta do protetor da agulha.

Para descartar o material deve-se seguir procedimentos internos do local de trabalho, atentando-se para algumas instruções básicas:

- Descartar agulhas em locais identificados para este fim (coletores próprios);
- As agulhas não devem ser desconectadas da seringa;
- As agulhas normalmente não devem ser re-encapadas, podendo ser utilizados protetores automáticos de agulhas existentes no mercado, para proteger os usuários;
- Cadastrar-se no sistema de lixo hospitalar de sua cidade para a coleta do lixo;
- Procurar seguir as várias normas referentes ao gerenciamento de lixo hospitalar.

  
**SALDANHA RODRIGUES LTDA. - FILIAL**  
**Farm. Américo Kaname Kayano**  
**Responsável Técnico**  
**CRF 5651/MS**