

COLCHÃO VETERINÁRIO DE POSICIONAMENTO A VÁCUO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

PATENTE REQUERIDA: PROCESSO BR 20 2026 008984 8

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Colchão de Imobilização a Vácuo Radiotransparente

Matéria Prima: Revestimento: Poliuretano

Estrutura interna: Grânulos de poliestireno (PS)

Peças: Plástico ABS

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: INDETERMINADA

DESCRIÇÃO

A Royal Tech Import disponibiliza ao mercado nacional o colchão de posicionamento a vácuo radiotransparente para uso veterinário, acompanhado de uma bomba manual de fácil manuseio. O equipamento possui em sua constituição uma cobertura de poliuretano — um material leve, resistente e de fácil limpeza. Já o seu interior é composto por grânulos de poliestireno (PS) que ficam rígidos quando submetidos ao vácuo. O colchão adapta-se perfeitamente aos contornos exatos do paciente conforme a necessidade, eliminando pontos de pressão isolados. Dessa forma, proporciona uma imobilização confortável e garante a redução de traumas de posicionamento. O produto possui uma válvula de segurança de alta qualidade: ao conectar a bomba manual, consegue-se realizar o vácuo no colchão em apenas 10 segundos, mantendo a pressão por mais de 72 horas.

INDICAÇÃO DE USO

O colchão de posicionamento a vácuo veterinário da Royal Tech Import é indicado para pequenos animais e pode ser utilizado em diversas situações, com o objetivo de proporcionar uma postura confortável e reduzir o trauma de posicionamento. O equipamento pode ser aplicado em cirurgias para fixar o local da intervenção no paciente e oferecer suporte à área cirúrgica. Também é ideal para procedimentos de diagnóstico por imagem, tais como ultrassom, radiografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). Por ser 100% radiotransparente, ele não gera artefatos na imagem, o que facilita a avaliação e a análise da condição corporal do animal. Com suas múltiplas funções, este colchão tornou-se um equipamento indispensável para clínicas e hospitais veterinários.

INSTRUÇÕES DE USO

- Verifique o colchão de posicionamento antes do uso para garantir que esteja em boas condições;
- Coloque o colchão de posicionamento na horizontal sobre uma superfície plana e pressione-o suavemente com a mão para distribuir as partículas de maneira uniforme;
- Verifique se a bomba está bem conectada ao tubo de conexão; se o tubo de conexão está bem conectado ao bocal de ar; e se a extremidade do tubo de conexão (lado do bocal) está conectada à válvula de ar do colchão de posicionamento;
- Use uma bomba de ar para retirar uma pequena quantidade de ar, deixando o colchão de posicionamento um pouco mais firme, de modo a não prejudicar as operações de posicionamento e moldagem;
- O animal é colocado deitado sobre o colchão de posicionamento; o colchão é então envolto na área de tratamento e moldado;
- Após a moldagem inicial, utiliza-se a bomba de ar para retirar parte do ar do colchão, formando um molde que se ajusta basicamente ao corpo do animal;
- Realizam-se ajustes finos com base no estado atual do molde; após os ajustes, utiliza-se a bomba novamente para criar um vácuo no colchão, formando o molde final;
- Recomenda-se realizar a sucção e a moldagem de três a cinco vezes durante o processo, o que torna o produto mais confortável, facilita a operação e melhora a fixação;
- Após concluir a moldagem, remova a bomba e feche a tampa da válvula;
- Após o uso, abra a tampa da válvula para liberar o vácuo interno do colchão e limpe a superfície.

DESINFECÇÃO


- Feche a válvula: Certifique-se de que a válvula de vácuo está totalmente fechada para evitar a entrada de líquidos no interior do colchão.
- Remova a sujeira grossa: Use um pano macio ou esponja não abrasiva umedecida em água morna e sabão neutro para retirar sangue, fluidos ou secreções.
- Enxágue inicial: Passe um pano limpo e úmido apenas com água para remover o excesso de sabão;
- Aplique o desinfetante: Utilize um desinfetante hospitalar compatível com poliuretano (ex: Sabão, detergente neutro, PHMB ou quaternário de amônio).
- Tempo de ação: Deixe o produto agir na superfície pelo tempo recomendado pelo fabricante do desinfetante (geralmente de 5 - 30 minutos);
- Enxágue final: Remova completamente o desinfetante com um pano limpo umedecido em água;
- Secagem completa: Seque o colchão com um pano limpo e seco ou deixe-o secar naturalmente à sombra antes de guardá-lo ou usá-lo novamente.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CPAV100X60RTI	COLCHÃO DE POSICIONAMENTO A VÁCUO (100X60CM) VETERINÁRIO (RTI)
CPAV60X40RTI	COLCHÃO DE POSICIONAMENTO A VÁCUO (60X40CM) VETERINÁRIO (RTI)
BACRTI	BOMBA A VÁCUO PARA COLCHÃO DE POSICIONAMENTO (MANUAL) VETERINÁRIO (RTI)

FOTO


Colchão de posicionamento a vácuo com revestimento em poliuretano (PU)

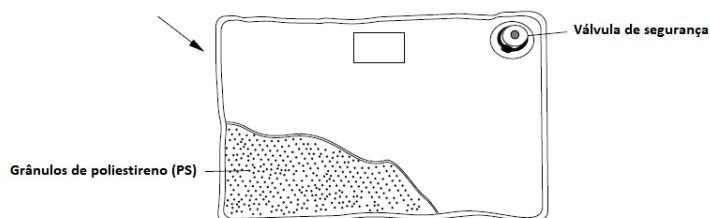

Bomba a vácuo manual

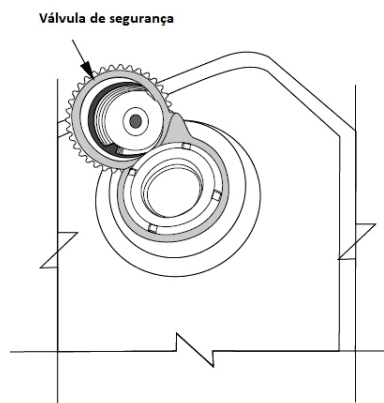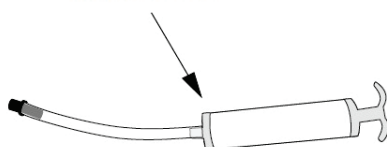

COLCHÃO DE POSICIONAMENTO
A VÁCUO (60X40CM)

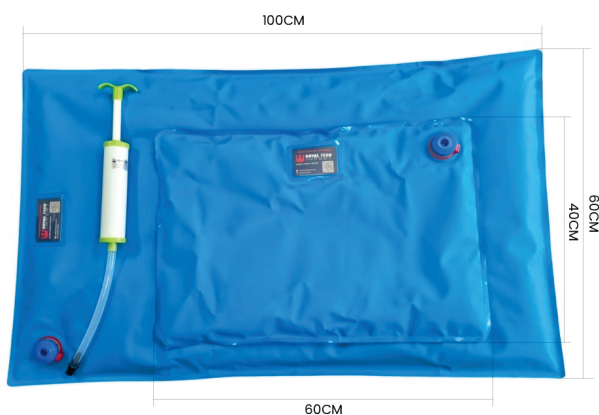

COMPOSIÇÃO

- Colchão de posicionamento a vácuo (100X60CM) ou (60X40CM) – 1un
- Bomba a vácuo manual para colchão de posicionamento – 1un
- Saco Plástico com fecho – 1un
- Caixa de papelão – 1un

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso por profissionais não capacitados;
- Ao cuidar de animais não anestesiados (como gatos), certifique-se de aparar as unhas antes do uso para evitar perfurar a superfície do colchão;
- O produto não é indestrutível, cuidar para que o paciente não efetue mordidas ou arranhaduras de grande impacto;
- Após o uso, restaurar seu estado original, reduzindo a tensão desnecessária e prolongando sua vida útil;
- Não utilizar soluções desinfetantes que contenham ingredientes cáusticos: povidona-iodo, branqueadores, solução de peróxido, hipoclorito de sódio entre outros produtos;
- Não utilizar lâ de aço para remover impurezas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Saco plástico com fecho.

Embalagem secundária: Caixa de papelão.

GARANTIA

Garantia legal de 90 dias para produtos duráveis, contados a partir do recebimento da mercadoria pelo cliente, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE

Produto fabricado na China.