

INSTRUÇÃO DE USO – EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL

Nº REGISTRO 80288090111

NOME TÉCNICO Equipos

INDICAÇÃO DE USO Os Equipos de Infusão Gravitacional são indicados para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir soluções parenterais em pacientes por gravidade. Pode ser usado combinado com agulhas, escalpes, cateteres, torneiras e outros dispositivos de infusão.

MECANISMO DE AÇÃO O Equipos de Infusão Gravitacional permite a administração de soluções contidos em um determinado recipiente para o sistema circulatório do paciente, por gravidade.

INSTRUÇÃO DE USO

- 1 - Abrir a embalagem de forma asséptica e retire o dispositivo do invólucro protetor;
- 2 - Feche o regulador de fluxo totalmente;
- 3 - Retire o protetor da ponta perfurante e conecte no frasco/ampola da solução;
- 4 - Preencha a câmara de gotejamento com a solução até um terço ou metade da sua altura;
- 5 - Em caso de equipo com respiro de ar, abri-los após preenchimento da câmara de gotejamento;
- 6 - Abra o regulador de fluxo sutilmente até que o líquido preencha totalmente o tubo flexível, para evitar bolhas de ar;
- 7 - Após o preenchimento de todo o tubo flexível feche novamente o regulador de fluxo;
- 8 - Retire o protetor do conector (slip ou lock) e encaixe no dispositivo de infusão (escalpe, agulha, cateter, etc.) de acordo com as normas técnicas assépticas;
- 10 - Abra o regulador de fluxo e ajuste a velocidade do gotejamento de acordo com a prescrição médica;
- 11 - Para aplicação de medicação complementar, utilize o injetor lateral.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. Esterilizado por Óxido de Etileno. Validade de cinco anos. Manter o produto em ambiente limpo, seco e fresco; temperatura ambiente e com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO **TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**
Matriz: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 | CIC | CEP: 81290-270 | Curitiba | PR | Brasil | Fone: +55 41 3022.0926
Filial: Av. Nilo Bittencourt, 55 | Unidade 05 | São Vicente | CEP: 88312-400 | Itajaí | SC | Brasil
www.tklbrasil.com.br | comercial@tklbrasil.com.br | @tkl_brasil
Responsável Técnica: Camila A. de M. Buzzatto | CRBM-6 1245