

NOME DO PRODUTO: AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO - WILTEX

Registro MS: 10150479137

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulha

Matéria Prima: Aço Inox

Método de Esterilização: Óxido de etileno

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Agulha Hipodérmica Estéril de uso único – WILTEX. Apresentação em diversos calibres e tamanhos, com o canhão colorido conforme o padrão internacional de cores.

INDICAÇÃO DE USO

Este dispositivo destina-se à injeção ou aspiração de fluidos utilizando uma seringa Luer-Lock ou Luer-Slip.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem unitária de forma asséptica. Para evitar a contaminação, tenha cuidado para não tocar no conector Luer da Agulha Hipodérmica.
2. Com um movimento de rotação suave, adapte a seringa ao conector Luer da Agulha Hipodérmica Wiltex.
3. Remova a tampa da agulha.
4. Aspire o fármaco para a seringa utilizando a técnica asséptica.
5. Execute a injeção seguindo os protocolos médicos vigentes e uma técnica asséptica.
6. Após a conclusão do procedimento, elimine em um recipiente adequado para perfuro cortantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componente	Material
Canhão	Polipropileno
Tampa da agulha	Polipropileno
Tubo da agulha	Aço inox SUS304
Lubrificante	Polidimethyl siloxane.

FOTO

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALIBRE	MEDIDA ANTERIOR	MEDIDA ATUAL	COR
ZSZ1640	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	16GX1 ½	40x16	1,60X40mm	branco
ZSZ1840	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	18GX1 ½	40x12	1,20x40mm	rosa
ZSZ1925	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	19G x 1	25x5	1,00x25mm	creme
ZSZ1930	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	19GX1¼	30x10	1,00x30mm	creme
ZSZ2125	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	21GX1	25x8	0,80x25mm	verde
ZSZ2130	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	21GX1¼	30x8	0,80x30mm	verde
ZSZ2140	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	21GX1½	40x8	0,80x40mm	verde
ZSZ2225	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	22GX1	25x7	0,70x25mm	preto
ZSZ2230	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	22GX1¼	30x7	0,70x30mm	preto
ZSZ2325	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	23GX1	25x6	0,60x25mm	azul
ZSZ2420	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	24GX3/4	20x5,5	0,55x20mm	roxo
ZSZ2613	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	26GX1/2	13x4,5	0,45x13mm	marron
ZSZ3013	Agulha Hipodérmica estéril - Wiltex	30GX1/2	13x3	0,30x13mm	amarelo

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Agulha hipodérmica estéril de uso único Wiltex é fornecida em embalagem individualmente blister papel grau cirúrgico e plástico de polipropileno (PP) / polietileno (PE); caixa secundária em papel triplex e caixa de transporte de papelão ondulado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado na umidade relativa não superior a 80%, nenhum gás corrosivo, um local fresco, seco e bem sala ventilada.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Este produto deve ser mantido limpo durante o transporte, evitar a luz direta do sol, manter longe de artigos de desinfecção corrosivos, como o cloro

ADVERTÊNCIAS

Deve ser utilizado por profissional habilitado

Não utilizar se a embalagem estiver violada

Produto de uso único, proibido reprocessar.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259