

Cadastro / Registro M.S.:

10369469023

Modelos cadastrados:

Bolsa coletora de urina com porta para coleta de amostras labor import.

Indicação de Uso:

A bolsa coletora de urina com ponto para coleta de amostras Labor Import é indicada para drenagem, coleta e mensuração da diurese de pacientes submetidos a sondagem vesical de demora ou de alívio. Geralmente estes pacientes encontram-se em situações cirúrgicas, de retenção urinária, baixa mobilidade ou apenas necessidade de controle hídrico diário, conforme recomendação médica. Os coletores de urina sistema fechado são destinados à coleta de urina do paciente em repouso, através de sonda foley, que estará conectado no tubo de extensão que o (a) enfermeiro (a) venha para drenar o líquido através do tubo de drenagem. O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que, seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de seu uso. Sugere-se que seja utilizado por pessoal qualificado, bem como, médico (a) e/ou enfermeiro (a). Os coletores são uso externo, não invasivo, porém sua esterilidade deve ser preservada, pois se conecta com uma sonda de foley, que é introduzida na uretra do paciente. O ponto para a coleta de amostras permite a coleta da urina para o envio ao laboratório de análises clínicas, com o objetivo de monitorar parâmetros necessários ao paciente.

Instrução de uso:

1. Certifique-se quanto ao posicionamento adequado e à fixação da sonda vesical no paciente. Inspeção visualmente a embalagem e o produto, deixando de utilizá-lo em caso de violação.
2. Verifique o prazo de validade.
3. Feche a pinça do tubo extensor e do tubo de saída.
4. Retire a tampa do conector e acople-o à sonda de foley.
5. Posicione a bolsa abaixo do nível de decúbito do paciente, a fim de assegurar um bom fluxo de drenagem.
6. Abra a pinça do tubo extensor.
7. Fixe a bolsa no leito, abaixo do nível do paciente.
8. Observe periodicamente o fluxo, para assegurar que esteja livre, sem obstruções.
9. Sempre que necessário, abra a pinça do tubo de saída para descarte do conteúdo.
10. Faça assepsia do ponto de saída após o esvaziamento da bolsa.
11. Para coleta de amostras, feche a pinça.
12. Fazer assepsia do ponto de coleta.
13. Com uma seringa e agulha perfurar o ponto de coleta e aspirar a urina e em seguida abra a pinça.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

Condições de armazenamento: estocar a temperatura ambiente entre 4°-35° e umidade entre 60 a 70%

Condições de transporte: transportar a temperatura ambiente.

Manipular a temperatura ambiente.

Advertência/Precaução:

Ao final do procedimento a bolsa coletora de urina com ponto para coleta de amostra deve ser descartada em local apropriado potencialmente contaminantes.

Siga o protocolo de sua instituição quanto à aplicação, assepsia e descarte deste material. O produto é estéril e de uso único, não podendo ser reesterilizado ou reutilizado.

Em caso de violação da embalagem e de vencimento do prazo de validade, não o utilize.

Validade:

5 anos.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda
Rua padre damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP
CNPJ: 01.005.728/0001-79
Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40
SAC: 0800 6658007
Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067
Fabricante: Poly Medicure Limited
Plot nº 104-105 & 115, Sector 59
HSIDC Industrial Area, Ballabgarh
Faridabad – 121 004 (Haryana)
India



Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.
Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso,165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525.